

STABILO

SYSTEM PODUSZEK I MATERACY STABILIZUJĄCYCH





Poduszka systemu STABILO jest wyrobem rehabilitacyjno-przeciwodleżynowym, przeznaczonym dla osób dorosłych i dzieci z porażeniem mózgowym, kompensującym i łagodzącym upośledzenia poprzez stabilizowanie chorego w pozycji siedzącej lub leżącej.

Przeznaczenie:

- profilaktyce przeciwodleżynowej,
- łagodzeniu skutków długotrwałego przebywania w jednej pozycji - przykurcze,
- stabilizowaniu chorego w przypadku wiotkości,
- produkt dedykowany jest dla pacjentów z porażeniem mózgowym (spastyka czterokończynowa) z niskim napięciem mięśniowym.

Ostrzeżenia:


- Poduszka systemu STABILO powinna być trwale zapięta do siedziska czy oparcia
- W razie potrzeby zwiększonej wentylacji ciała stosować przewiewny podkład
- Unikać ostrych przedmiotów mogących uszkodzić poduszkę
- Nie używać do mycia środków na bazie rozpuszczalników: toluen, aceton
- Nie ciągnąć za zaworek
- Nie nadmuchiwać poduszki
- Używać tylko specjalnej pompki dołączonej do poduszki
- Nie prasować za pomocą żalazka
- W przypadku rozprucia, z poduszki mogą się wydostać mikrogranulki niebezpieczne dla małych dzieci.

Jak używać:

1. Wyciągnąć wężyk znajdujący się w ręczce pompki.
2. Wkręcić wężyk w zaworek poduszki i poczekać, aż poduszka będzie dostatecznie miękka.
3. Wstępnie ukształtować poduszkę (ręcznie do potrzebnego kształtu lub np. nią).
4. Dokręcić pompkę do wężyka i odessać powietrze, do momentu uzyskania o odkręceniu wężyka!
5. Dla zmiany kształtu - wkręcić sam wężyk do zaworka i poczekać, aż poduszka zmięknie.
6. Przy dużych zmianach temperatury, należy dodatkowo ponownie użyć pompki do uzyskania właściwej twardości (↑ °C poduszka mięknie, ↓ °C poduszka twardnieje).
7. Należy użyć pompy do ustawienia wymaganej twardości, gdy znacznie zmienia się temperatura.



Stabilo "BASE" - SIEDZISKO STABILIZUJĄCE

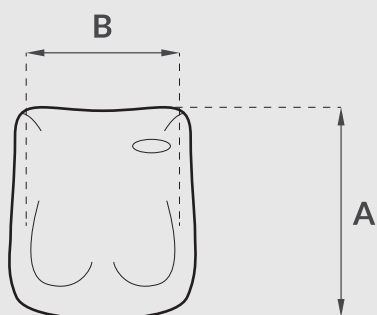

WYMIARY

cm	A	B
S	25	38
S+	35	35
M	40	40
L	50	50

PRZEZNACZENIE

- Dla osób z różnego rodzaju deformacjami miednicy.
- Dla osób z asymetrią bioder.

DZIAŁANIE


- Podpiera i stabilizuje biodra (dzięki czemu poprawia się postawa całego ciała).
- Odciąża wrażliwe części ciała.

ZASTOSOWANIE

- Umożliwia modelowanie klina i utworzenie rynny dla odwiezienia ud.
- Pozwala na uniesienie któregoś z bioder.
- Umożliwia regulację kąta zgięcia biodrowego.
- Stabilizuje miednicę w standardowym wózku lub w zwykłym fotelu.



Stabilo "COMFORTABLE" - STABILIZACJA PLECÓW

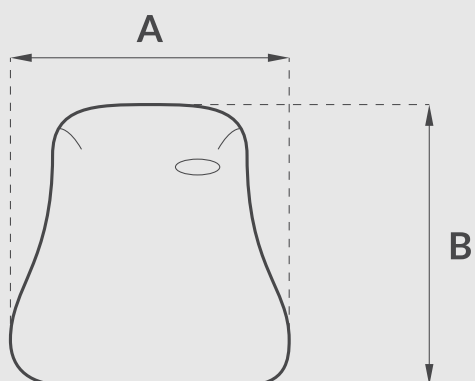

WYMIARY

cm	A	B
S	52	40
M	56	50
L	70	50

PRZEZNACZENIE

- Dla osób z asymetrią lub wadą postawy.
- Dla osób z obniżonym napięciem mięśniowym tułowia.

DZIAŁANIE


- Umożliwia podparcie pleców na całej powierzchni.
- Poprawia kontrolę postawy.
- Zapewnia komfort oparcia.

ZASTOSOWANIE

- Uzupełnia oparcie wózków.
- Przytrzymuje pacjentów w aktywnych wózkach sportowych.



Stabilo "COMFORTABLE PLUS" - OPARCIE GORSETOWE

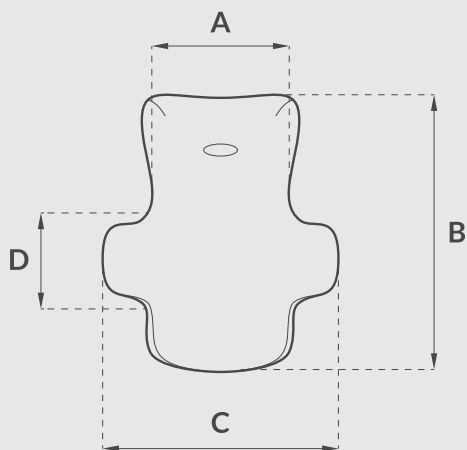

WYMIARY

cm	A	B	C	D
S	30	50	58	28
M	35	60	65	28
L	40	75	75	35
XL	45	75	85	35

PRZEZNACZENIE

- Dla osób wymagających zwiększonej stabilizacji tułowia.
- Dla osób nietolerujących sztywnych gorsetów.

DZIAŁANIE


- Różnokierunkowo podpira tułów.
- Przy pomocy bocznych pelot podtrzymuje pacjentów ze skoliozą.
- Dzięki zagłówkowi pomaga utrzymać prawidłową pozycję głowy.

ZASTOSOWANIE

- Uzupełnia oparcie wózka lub innego siedziska.
- Jako miękki, modelowany gorset.
- Stabilizuje podczas kąpieli.



Stabilo "COMFORTABLE PLUS DUO" - SIEDZISKO STABILIZUJĄCE

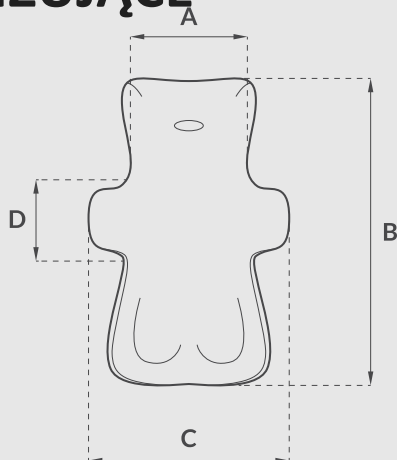

WYMIARY

cm	A	B	C	D
S	30	80	58	28
M	35	95	65	28
L	40	115	75	35
XL	45	120	85	35

STABILO CONFORTABLE PLUS DUO to kompleksowe siedzisko stabilizujące. Łączy ono funkcje siedziska BASE i oparcia gorsetowego CONFORTABLE PLUS.

PRZEZNACZENIE

- Dla osób ze spastyką – zapewnia stabilizację i bezpieczeństwo przy dużych napięciach mięśniowych.

- Dla osób wiotkich – pozwala na prawidłowe ułożenie ciała.
- Dla pacjentów ze skrzywieniem kręgosłupa-zapobiega lub zatrzymuje powstawanie zniekształceń kręgosłupa.
- Dla osób z obniżoną lub brakiem kontroli głowy-umożliwia uformowanie zagłówka.

DZIAŁANIE


- Połączenie siedziska z oparciem tworzy samonośny, kompletny fotel. Takie rozwiązanie doskonale stabilizuje miednicę i tułów.
- Obszerny zagłówek pomaga utrzymać prawidłową pozycję głowy.
- Boczne peloty podtrzymują pacjenta ze skoliozą.

ZASTOSOWANIE

- Uzupelnienie oparcia wózka.
- Uzupelnienie innego siedziska (np. krzesło, fotel, kanapa).
- Samodzielne siedzisko w domu lub w plenerze.
- Obszerny zagłówek pomaga utrzymać prawidłową pozycję głowy.
- Jako materac do leżenia i półleżenia.
- Siedzisko do kąpeli.
- Zwiększenie stabilności w transporcie samochodowym.



Stabilo "GRANDE" - MATERAC DO LEŻENIA, PÓŁLEŻENIA, SIEDZENIA

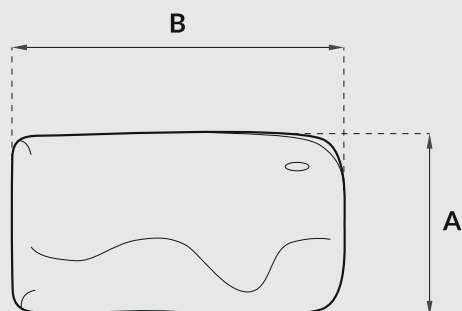

WYMIARY

cm	A	B
M	70	160
M+	90	200
L	130	200

PRZEZNACZENIE

- Dla osób z dużymi zniekształceniami uniemożliwiającymi lub utrudniającymi leżenie.
- Dla osób leżących z dużymi deformacjami dla zapobiegania odleżynom.
- Dla osób z dużymi deformacjami dla uzyskania stabilnej podpory i stabilizacji ciała w leżeniu i siedzeniu.

DZIAŁANIE


- Niszuje (można pacjenta opatulić).
- Wielkość, duża ilość granulatu i duża powierzchnia umożliwia głębokie i precyzyjne przyleganie materaca.
- Stabilizuje podczas wykonywania ćwiczeń.

ZASTOSOWANIE

- Jako samodzielne siedzisko.
- Jako uzupełnienie innego siedziska.
- Materac do leżenia.
- Do utrwalenia efektów rehabilitacji.
- Po odpowiednim ukształtowaniu znajduje zastosowanie do ćwiczeń rehabilitacyjnych na brzuchu.



Stabilo "Podłokietnik" - PODŁOKIETNIK STABILIZUJĄCE

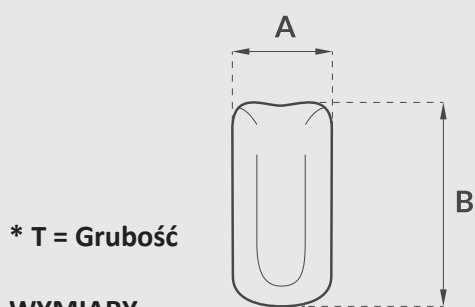

* T = Grubość

WYMIARY

cm	A	B	T*
M	25	30	4
L	25	45	7

PRZEZNACZENIE

- Dla osób ze spastyką oraz przykurczami dłoni i nadgarstka.

DZIAŁANIE

- Dopasowanie do anatomicznego kształtu ręki.
- Odwiedzenie i wyprostowanie palców i nadgarstka.
- Stabilne podparcie ramienia ma bezpośredni wpływ na prawidłowe ustawienie kręgosłupa.


ZASTOSOWANIE

- Prawidłowe ułożenie i ustabilizowanie przedramienia przy hemiplegii.



Z rzepami

Stabilo "Zagłówek" - ZAGŁÓWEK STABILIZUJĄCE

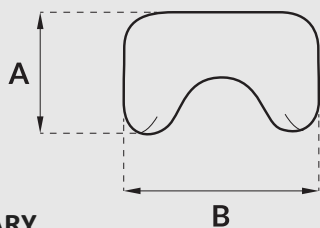

WYMIARY

cm	A	B
M	15	30



PRZEZNACZENIE

- Stabilizacja dla osób z obniżoną kontrolą głowy.

DZIAŁANIE

- Dopasowuje się do kształtu głowy.
- Umożliwia podparcie głowy w najbardziej korzystnym punkcie.

ZASTOSOWANIE

- Uniwersalny zagłówek do większości wózków.

Montaż:

W większości przypadków nie ma potrzeby stosowania dodatkowych mocowań.

- Naszycie rzepów w pożądanym miejscach.
- Zastosowanie rzepowego pokrycia neoprenu.
- Mocowanie zagłówka.
- Mocowanie podłokietnika.
- Mocowanie do fotela za pomocą paska.

Serwisowanie i mycie:

- Regularnie kontrolować stan wyrobu (zwracać uwagę na pęknięcia i rozprucia),
- Przed myciem zakręcić kapturek zaworka,
- Myć pod bieżącą wodą - w wannie, pod prysznicem (do 60°C), z zastosowaniem detergentu np. płynu do mycia naczyń,
- W praniu
- Nie używać środków na bazie rozpuszczalników - toluen, aceton.



Mycie:

Stabilo pokrywa rozciągliwa tkanina z czystego nylonu, który jest dobrze tolerowany przez skórę. Pokrycie jest dobrane pod kątem łatwości utrzymania higieny, mycia i dezynfekcji. Szczelna powłoka pozwala na mycie pod bieżącą wodą, pod prysznicem czy w wannie. Zalecane jest używanie popularnych płynów do mycia naczyń. Po wypłukaniu poduszkę można wytrzeć ręcznikiem papierowym, co przyspieszy jej wysuszenie. Nie suszyć w suszarce. Można stosować chlorowe i spirytusowe preparaty do dezynfekcji.

Pompki:

Każda poduszka Stabilo wyposażona jest w specjalną pompkę próżniową. Pompka ręczna używana jest do małych poduszek, a elektryczna do materacy.



Gwarancja:

Producent udziela 24 miesięcy gwarancji. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń poduszek. W razie wątpliwości proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z producentem. Wszelkie incydenty zgłaszać sprzedawcy lub producentowi.

Belgia

N.V. Vermeiren N.V.
Vermeirenplein 1 / 15
B-2920 Kalmthout
Tel: +32(0)3 620 20 20
Faks: +32 (0)3 666 48 94
witryna internetowa:
www.vermeiren.pl
e-mail: info@vermeiren.be

Hiszpania / Portugalia

Vermeiren Iberica, S.L.
Carratera de Cartellà, Km 0,5
Sant Gregori Parc Industrial
Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)
Tel: +34 972 42 84 33
Faks: +34 972 40 50 54
witryna internetowa:
www.vermeiren.es

Czechy

Vermeiren CR S.R.O.
Nádražní 132
702 00 Ostrava 1
Tel: +420 596 133 923
Fax: +420 596 121 976
witryna internetowa:
www.vermeiren.cz
e-mail: info@vermeiren.cz

Francja

Vermeiren France S.A.
Z. I., 5, Rue d'Ennevelin
F-59710 Avelin
Tel: +33(0)3 28 55 07 98
Faks: +33(0)3 20 90 28 89
witryna internetowa:
www.vermeiren.fr
e-mail: info@vermeiren.fr

Polska

Vermeiren Polska Sp.z o.o
ul. Łączna 1
PL-55-100 Trzebnica
Tel: +48(0)71 387 42 00
Faks: +48(0)71 387 05 74
witryna internetowa:
www.vermeiren.pl
e-mail: info@vermeiren.pl

Niemcy

Vermeiren Deutschland GmbH
Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Tel: +49(0)211 94 27 90
Faks: +49(0)211 65 36 00
witryna internetowa:
www.vermeiren.de
e-mail: info@vermeiren.de

Austria

L. Vermeiren Ges. mbH
Schärdinger Strasse 4
A-4061 Pasching
Tel: +43(0)7229 64900
Fax: +43(0)7229 64900-90
witryna internetowa:
www.vermeiren.at
e-mail: info@vermeiren.at

Włochy

Vermeiren Italia
Viale delle Industrie 5
I-20020 Arese MI
Tel: +39 02 99 77 07
Faks: +39(02)93 58 56 17
witryna internetowa:
www.vermeiren.it
e-mail: info@vermeiren.it

Szwajcaria

Vermeiren Suisse S.A.
Hühnerhubelstraße 59
CH-3123 Belp
Tel: +41(0)31 818 40 95
Faks: +41(0)31 818 40 98
witryna internetowa:
www.vermeiren.ch
e-mail: info@vermeiren.ch



**STABILO ~
SYSTEM PODUSZEK I
MATERACY
STABILIZUJĄCYCH**